

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

МБДОУ детского сада № 527

от «10» января 2022 г. № 1/11 - о

Заведующий
МБДОУ детского сада № 527
детский сад № 527
И.Н. Костицына



Инструкция по эксплуатации 2-х секционного телескопического пандуса (Мега 2Пт1-180)

2-х секционный телескопический пандус (Мега 2Пт1-180) используется для спуска/подъема инвалидных колясок на 1 этаже здания МБДОУ детского сада № 527 у входа со стороны двора. Предназначен для установки на марше лестницы 1 этажа, где установка стационарного пандуса мешает проходу пешеходов.

Пандус устанавливается ответственным лицом при прибытии (убытии) инвалида, маломобильного гражданина в(из) МБДОУ детский сад № 527.

Для установки пандуса необходимо:

1. взять упаковку с пандусом на шкафу в помещении вспомогательного персонала;
2. извлечь пандус из упаковки, затем из мягкого футляра, путем расстегивания молнии;
3. взять один полоз пандуса вертикально, так чтобы фиксирующая желтая кнопка была под пальцами правой руки;
4. нажатием пальца на желтую кнопку удлинить пандус до щелчка (желтая кнопка в данном случае зафиксирует длину пандуса на другом его конце);
5. то же самое проделать со вторым полозом пандуса;
6. определить верхнюю и нижнюю части полозьев (концы полозьев имеют изгибы: верхняя часть —внутри, нижняя - наружу);
7. каждый полоз пандуса уложить на ступени лестничного марша 1 этажа на выходе (входе) во (со) двор(а), соответственно концами, изогнутыми внутрь наверх, наружу - вниз (ширина между полозьями на более 50 см), проверить устойчивость полозьев (перед этим при необходимости, освободив проход от напольных покрытий);
8. после использования полозья пандуса очистить от грязи, протереть влажной ветошью, сложить в упаковку, убрать на место.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023